

BioPro HBS Instructions for Use

Indications d'emploi :

1. La vis à os sans tête est désignée pour l'utilisation avec de petites fractures osseuses, l'arthrodèse et les ostéotomies dans les extrémités.

Contre-indications :

1. Surface osseuse comminutive qui limiterait l'installation d'une vis.
2. Conditions pathologiques de l'os comme l'ostéopénie qui nuirait à la capacité de bien installer la vis.
3. Sensibilité aux corps étrangers en métal, surtout en titane. Lorsque la sensibilité au matériel est soupçonnée, des tests appropriés doivent être faits avant l'implantation.

Sterile:



Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène gazeux. Mise en garde : Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Il s'agit d'un dispositif à usage unique. La réutilisation de ce dispositif peut entraîner le transfert de matières autres que les os, la chaire, le sang ou des maladies infectieuses. Le dispositif est stérile et une deuxième stérilisation du dispositif n'est pas valide. Avertissement : La sécurité et la compatibilité de la vis HBS n'ont pas été évaluées dans un environnement de RM. La chaleur ou la migration de la vis GBS dans un environnement de RM n'ont pas été testées.



BioPro, Inc.
2929 Lapeer Road
Port Huron, MI 48060
USA
810-982-7777 (P)
810-982-7794 (F)