

Indications d'emploi :

La vis à os sans tête est désignée pour l'utilisation avec de petites fractures osseuses, l'arthrodèse et les ostéotomies dans les extrémités.

HBS BioPro

Contre-indications :

1. Surface osseuse comminutive qui limiterait l'installation d'une vis.
2. Conditions pathologiques de l'os comme l'ostéopénie qui nuirait à la capacité de bien installer la vis.
3. Sensibilité aux corps étrangers en métal, surtout en titane. Lorsque la sensibilité au matériel est soupçonnée, des tests appropriés doivent être faits avant l'implantation.

Stérile :   

Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène gazeux. Mise en garde : Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Il s'agit d'un dispositif à usage unique. La réutilisation de ce dispositif peut entraîner le transfert de matières autres que les os, la chaire, le sang ou des maladies infectieuses. Le dispositif est stérile et une deuxième stérilisation du dispositif n'est pas valide.

Avertissement : La sécurité et la compatibilité de la vis HBS n'ont pas été évaluées dans un environnement de RM. La chaleur ou la migration de la vis GBS dans un environnement de RM n'ont pas été testées.

Pour un glossaire complet des symboles, veuillez consulter www.bioproimplants.com/ifu. Pour recevoir une version imprimée dans les cinq jours ouvrables, veuillez écrire à orders@bioproimplants.com



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



BioPro, Inc.
2929 Lapeer Road
Port Huron, MI 48060
810-982-7777 (P)
810-982-7794 (F)



22335 01